


ООО «ГЛОБУС А»

СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА  
**КЛАВИНТА**  
Программа «Педагог»

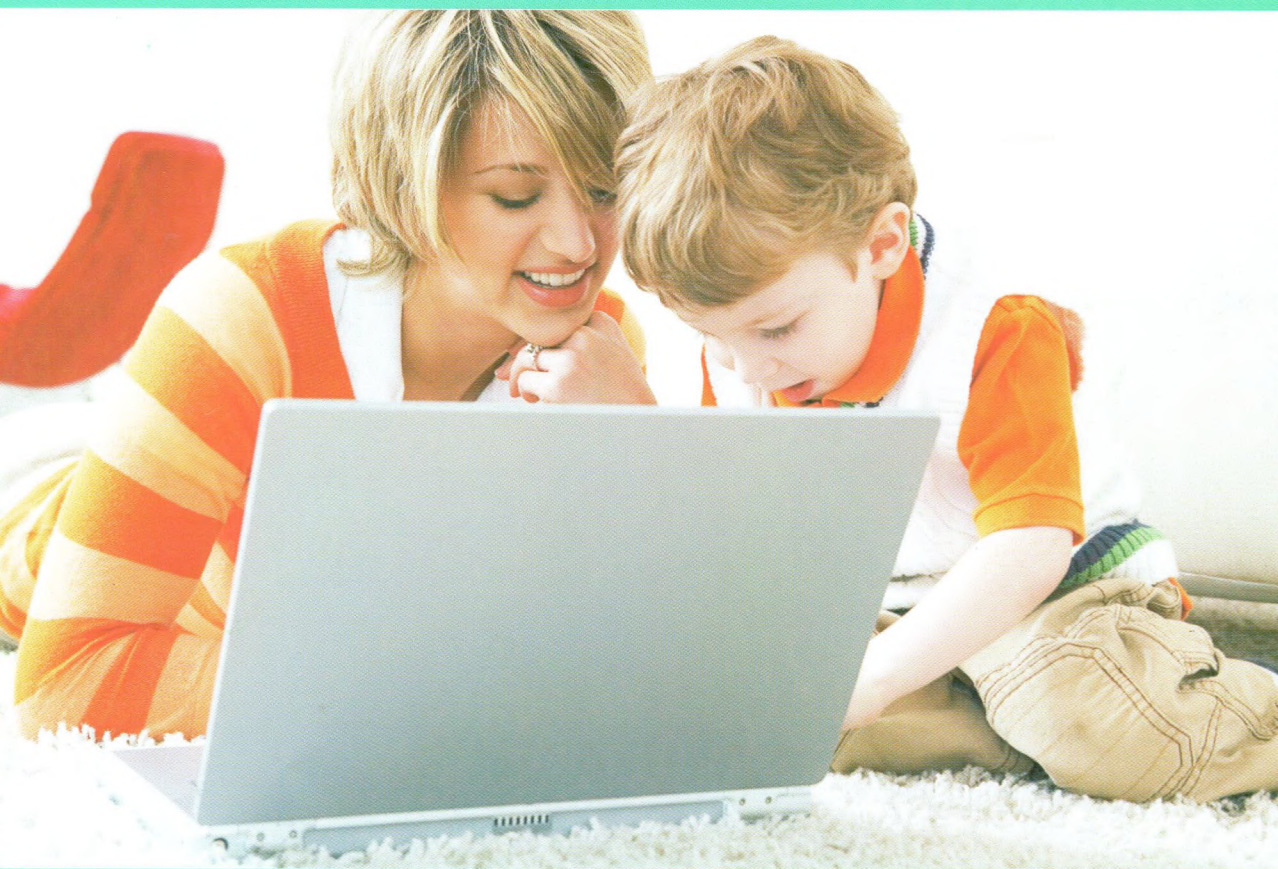

*Руководство пользователя*

Программный продукт «Педагог» разработан для удобства использования сенсорной клавиатуры «Клавинта» в группах пользователей. Программа «Педагог», позволяет создавать группы пользователей с индивидуальными настройками сенсорной клавиатуры для каждого пользователя, изменять и хранить их.

Программа «Педагог» позволяет быстро изменить настройки сенсорной клавиатуры, при смене пользователя или при смене задачи, выполняемой на сенсорной клавиатуре.

Преподавателю не надо запоминать индивидуальные настройки сенсорной клавиатуры для каждого ученика, это легко сделать в программе «Педагог», которая сама считает все действующие, в текущий момент, настройки сенсорной клавиатуры и сохранит их в файле под именем ученика. Педагогу останется только подтвердить эти настройки или изменить их, чтобы в дальнейшем, нажатием одной кнопки, загрузить их в сенсорную клавиатуру.

Файлы с индивидуальными настройками сенсорной клавиатуры хранятся в папке «Pedagog», там же, где находится исполняемый файл программы «Педагог». Преподаватель может хранить и запускать программу «Педагог» на любом диске, включая съёмный диск, например «Flash карту». Но, помните, если Вы хотите использовать этот носитель как рабочий для программы «Педагог», то этот носитель должен иметь возможность сохранять изменённые файлы в процессе работы программы.

Место расположения программного продукта «Педагог» можно поменять в любой момент, просто перенесите всю папку «Pedagog» на другой носитель.

Программный продукт «Педагог» требует не более 10 Мбайт дискового пространства.

Программа «Педагог» работает с операционными системами Windows и Mac OS X.

## Оглавление

стр.

Установка программы «Педагог» _____	4
Установка программного обеспечения для операционной системы «Windows» _____	4
Установка программного обеспечения для операционной системы «MAC OS X» _____	4
Работа с программой «Педагог» _____	5
Редактирование групп пользователей _____	6
Редактирование пользователя _____	6
Редактирование параметров сенсорной клавиатуры, закреплённых за пользователем _____	6
Как закрепить за пользователем параметры сенсорной клавиатуры?	
Функция клавиши «СЧИТАТЬ» _____	9
Как применить параметры сенсорной клавиатуры, закреплённые за пользователем?	
Функция клавиши «ПРИМЕНИТЬ» _____	10

## Установка программы «Педагог».

### **Установка программы на компьютер с операционной системой «WINDOWS».**

Программный продукт «Педагог» находится на установочном CD диске «КЛАВИНТА» в загрузочном файле «Setup.exe» в разделе «Windows».

Программа «Педагог» устанавливается автоматически при установке программы «Клавинта». Инструкцию по установке программы «Клавинта» смотрите в руководстве пользователя сенсорной клавиатурой «Клавинта».

В результате выполнения процедур по установке программы «Клавинта», на жёстком диске вашего компьютера в папке с названием “Klavinta” будет создана папка «Pedagog», в которой находится исполняемый файл «Pedagog.exe».

Программа «Педагог» запускается двойным щелчком на файле «Pedagog.exe».

Для удобства запуска программы, Вы можете создать «ярлык» на рабочем столе Вашего компьютера.

### **Установка программы на компьютер с операционной системой «MAC OS X».**

Программный продукт «Педагог» находится на установочном CD диске «КЛАВИНТА» в папке «Pedagog» в разделе «MAC».


Программа «Педагог» устанавливается путём копирования папки «Pedagog» на любой носитель.

Программа «Педагог» запускается двойным щелчком на файле «Pedagog», который находится в папке «Pedagog».


Для удобства запуска программы, Вы можете создать «ярлык» на рабочем столе Вашего компьютера.

## Работа с программой «Педагог».

После запуска программы «Педагог» на экране компьютера появится окно «Редактирование состава групп»:

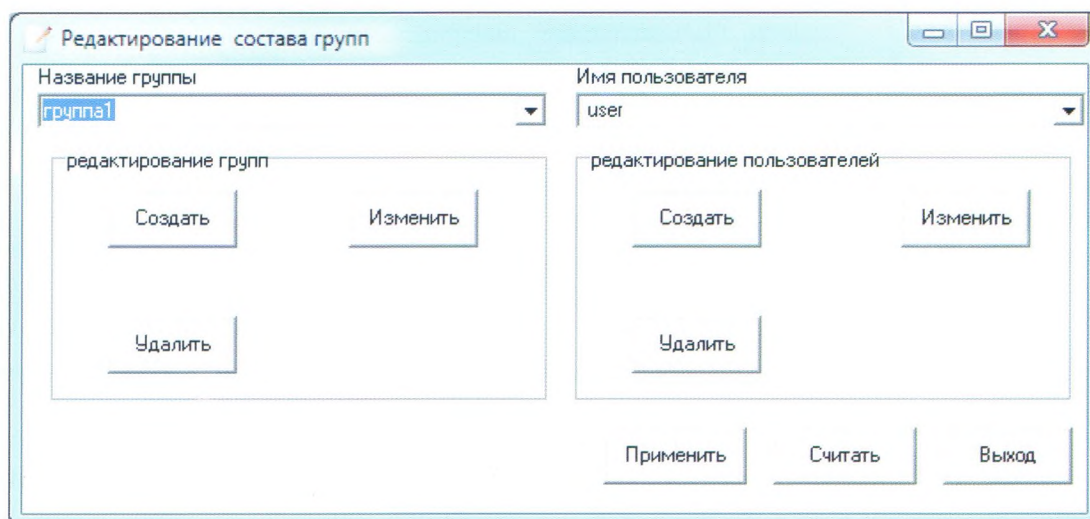

Окно для версии MAC OS X:

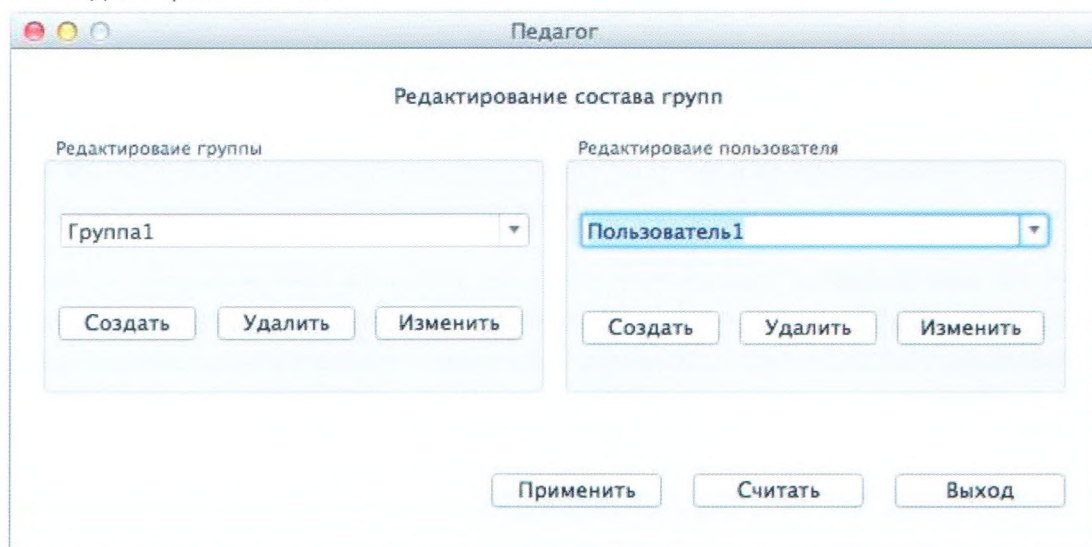

В левой части окна расположены клавиши для редактирования групп пользователей. В правой части окна расположены клавиши для редактирования пользователей.

Группа служит для объединения нескольких индивидуальных пользователей, по какому либо признаку, например, учащиеся одного класса.

**Пример:** Создайте группу с названием «Класс-1а». Затем в «Класс-1а» создайте пользователей с именами «Иванов», «Петров» и т.д.

Во время выполнения действий по редактированию групп пользователей и самих пользователей будут появляться окна, в которых будут находиться **клавиши «Сохранить»** и **«Выход»**. **Клавише «Сохранить»** соответствует выход из данного окна с сохранением изменений. **Клавише «Выход»** соответствует выход из данного окна без сохранения изменений. Указанные действия, справедливы для всех окон программы «Педагог» где встречаются эти клавиши.

## Редактирование групп пользователей.

Программа «Педагог» позволяет: создать группу пользователей, изменить её название, удалить группу пользователей.

Чтобы создать группу пользователей нажмите на клавишу **«Создать»** в окне **«Редактирование групп»**. Далее выполняйте действия, которые предлагает программа.

Чтобы изменить название уже созданной группы пользователей выберите эту группу из выпадающего списка групп пользователей и нажмите на клавишу **«Изменить»** в окне **«Редактирование групп»**. Отредактируйте имя группы. Для сохранения изменений нажмите на клавишу **«Сохранить»**. Для выхода без сохранения нажмите на клавишу **«Выход»**.

Чтобы удалить группу пользователей выберите эту группу из выпадающего списка групп пользователей и нажмите на клавишу **«Удалить»** в окне **«Редактирование групп»**. Далее выполняйте действия, которые предлагает программа.

**Внимание!** Удалив группу пользователей, Вы лишаетесь, информации по всем пользователям, которые входили в эту группу.

## Редактирование пользователя.

Программа «Педагог» позволяет: создать пользователя с новым именем в группе пользователей, изменить имя пользователя, удалить пользователя с заданным именем из заданной группы пользователей, закрепить за пользователем настройки сенсорной клавиатуры «КЛАВИНТА».

Чтобы ввести нового пользователя в группу пользователей выберите из выпадающего списка групп требуемую группу пользователей и нажмите на клавишу **«Создать»** в окне **«Редактирование пользователей»**. Далее выполняйте действия, которые предлагает программа.


Чтобы удалить пользователя из группы пользователей выберите из выпадающего списка групп требуемую группу пользователей, в этой группе выберите имя пользователя, которого Вы хотите удалить и нажмите на клавишу **«Удалить»** в окне **«Редактирование пользователей»**. Далее выполняйте действия, которые предлагает программа.

Чтобы изменить имя пользователя выберите это имя из выпадающего списка имён пользователей и нажмите на клавишу **«Изменить»** в окне **«Редактирование пользователей»**. Появится окно **«Изменение данных пользователя»**. Отредактируйте в этом окне имя пользователя. Для сохранения изменений нажмите на клавишу **«Сохранить»**. Для выхода без сохранения нажмите на клавишу **«Выход»**.


## Редактирование параметров сенсорной клавиатуры, закреплённых за пользователем.

Кроме редактирования имени пользователя, на клавишу **«Изменить»** в окне **«Редактирование пользователей»** возложен ряд функций, которые позволяют изменить параметры сенсорной клавиатуры «КЛАВИНТА», которые закреплены за пользователем. Рассмотрим эти функции подробнее:

Нажмите клавишу «Изменить» в окне «Редактирование пользователей». На экране компьютера появится окно «Изменение данных пользователя».

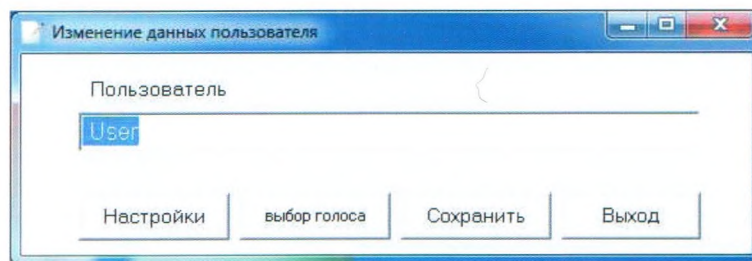


Окно для версии MAC OS X:

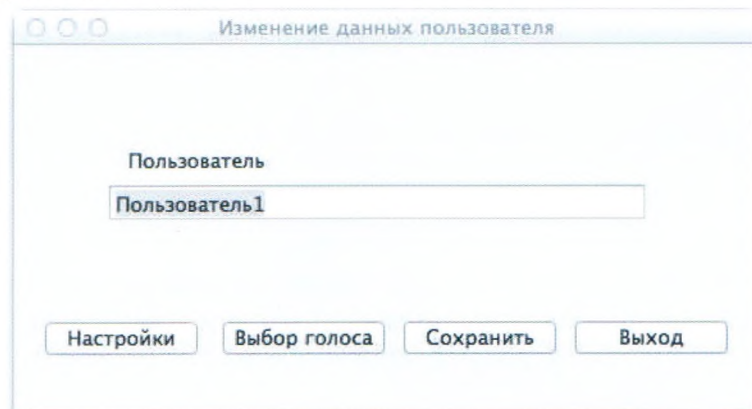


В этом окне находятся клавиши: «Настройки», «Выбор голоса», «Сохранить», «Выход».

Клавиши «Сохранить» и «Выход» распространяют своё действие только на функцию «Изменить имя пользователя».

Клавиша «Настройки» служит для входа в окно настроек сенсорной клавиатуры «КЛАВИНТА», в котором можно задать индивидуальные настройки сенсорной клавиатуры для выбранного пользователя. Нажав на клавишу «Настройки» на экране компьютера появится окно «Настройки сенсорной клавиатуры».

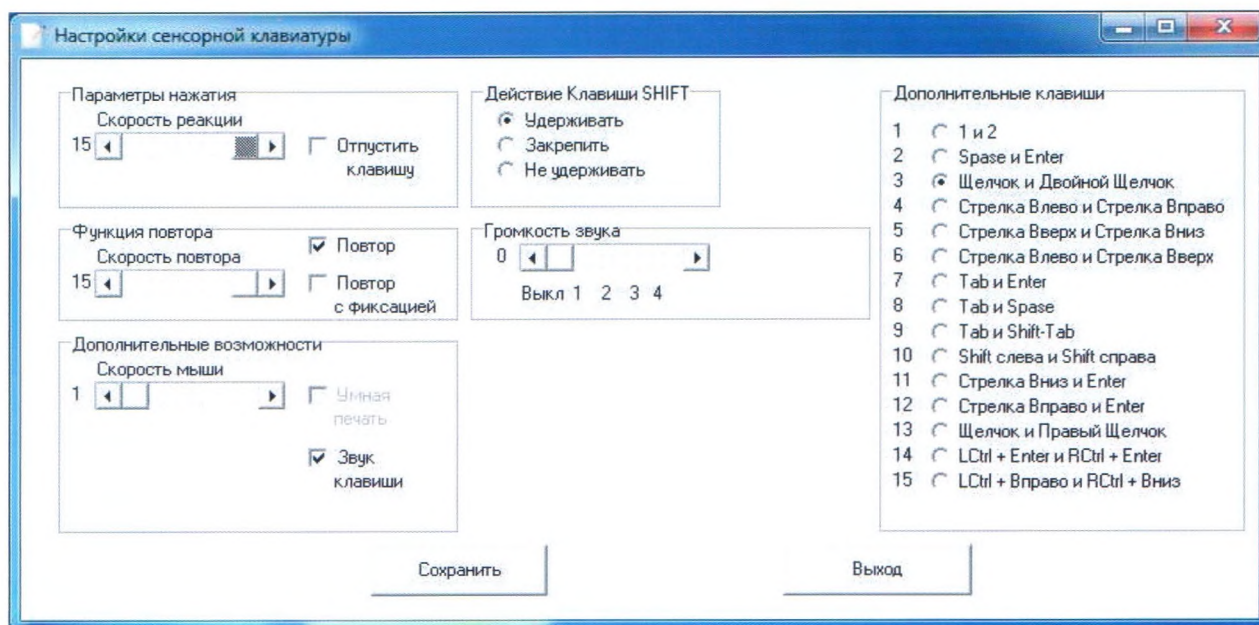


Окно для версии MAC OS X:

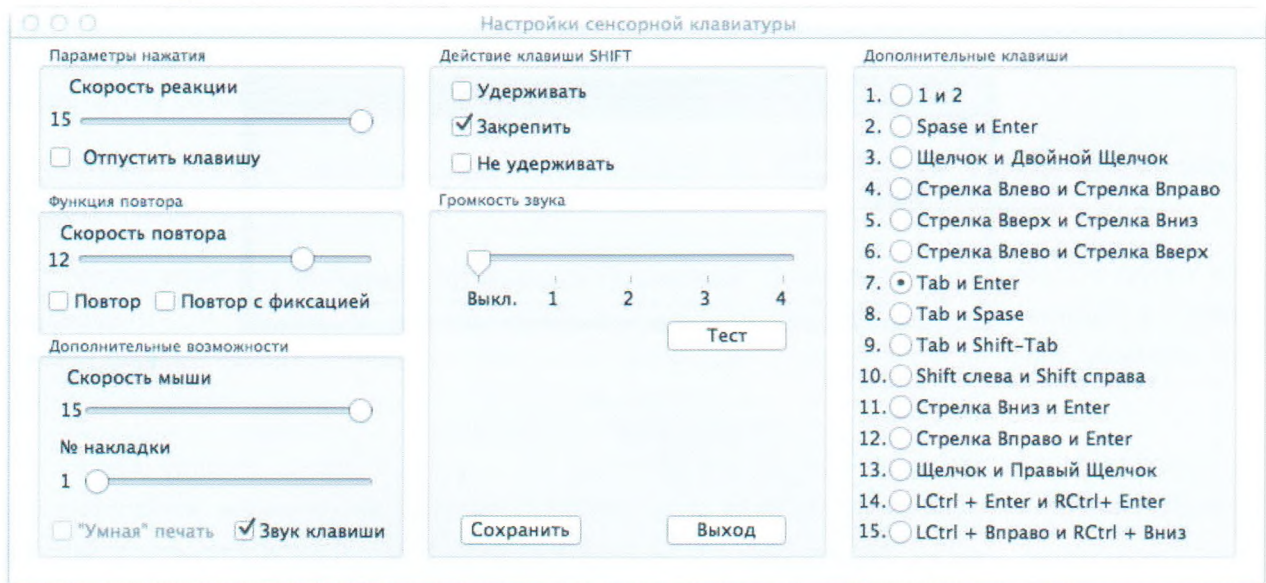


Окно «Настройки сенсорной клавиатуры» полностью соответствует аналогичному окну в программе «Клавинта». Задайте в окне, необходимые параметры сенсорной клавиатуры. Для сохранения изменений нажмите на клавишу «Сохранить». Для выхода без сохранения нажмите на клавишу «Выход».

**Клавиша «Выбор голоса»** служит для входа в окно настроек голоса для звуков накладки «КОММУНИКАЦИЯ» сенсорной клавиатуры «КЛАВИНТА». Нажав на клавишу «Настройки» на экране компьютера появится окно «Выбор голоса».

Для ОС WINDOWS

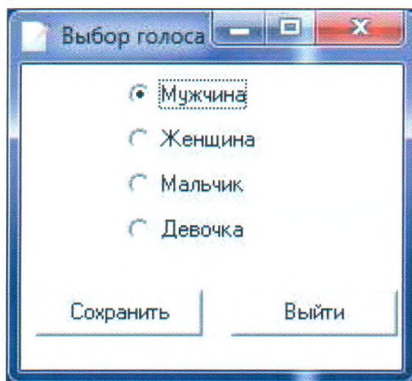

Для версий MAC OS X и OS LINUX:

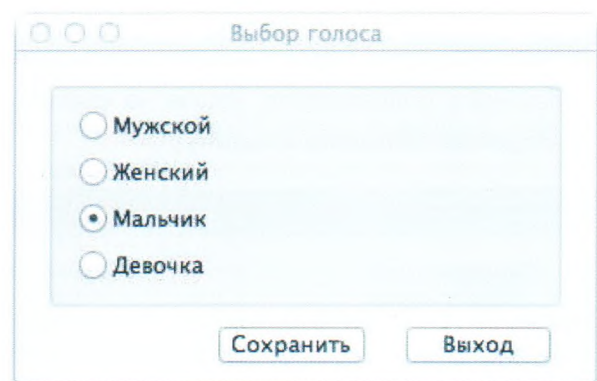

Выберете голос. Для сохранения изменений нажмите на клавишу «Сохранить». Для выхода без сохранения нажмите на клавишу «Выход».



## Функция клавиши «СЧИТАТЬ».


### Как закрепить за пользователем параметры сенсорной клавиатуры?

Рассмотрим присвоение параметров сенсорной клавиатуры пользователю на примере.


Преподаватель создаёт группу пользователей, например, «Класс №1» (см. раздел «Редактирование групп пользователей»).

В группе «Класс №1» преподаватель создаёт пользователя, например, с именем «Иванов Иван Иванович». При создании нового имени, программа, автоматически присваивает этому пользователю параметры сенсорной клавиатуры «по умолчанию».

Далее, находясь в окне «Редактирование состава групп»,

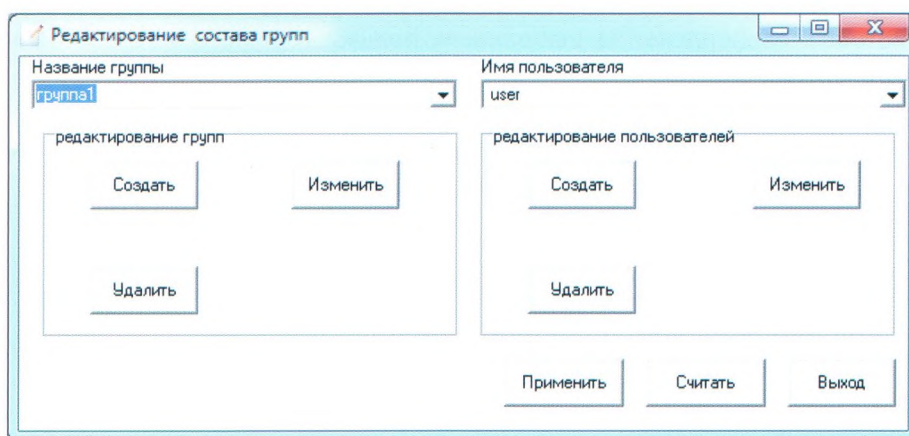

Окно для версии MAC OS X:

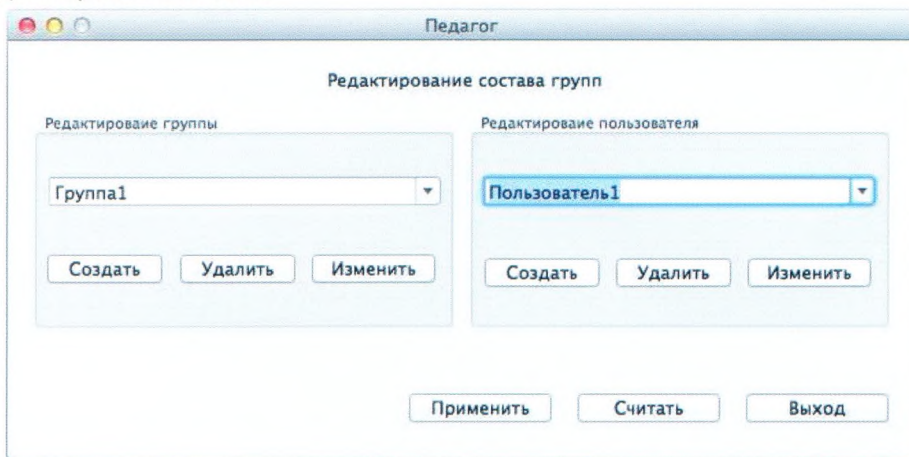

преподаватель, имеет возможность изменить параметры сенсорной клавиатуры двумя возможными способами.

**Первый**, с помощью клавиши «Изменить» в окне «Редактирование пользователей», рассмотрен в разделе «Редактирование параметров сенсорной клавиатуры пользователя».

**Второй** - нажав на клавишу «Считать». При этом параметры считываются непосредственно с сенсорной клавиатуры «КЛАВИНТА», которые действуют в текущий момент, и присваиваются пользователю «Иванову Ивану Ивановичу» из группы «Класс №1».

## Функция клавиши «ПРИМЕНИТЬ».

### Как применить параметры сенсорной клавиатуры, закрепленные за пользователем?

Рассмотрим на примере как задать сенсорной клавиатуре параметры, закреплённые за пользователем.

Находясь в окне **«Редактирование состава групп»**, преподаватель выбирает группу пользователей из выпадающего списка, например, «Класс №1».

Далее, из выпадающего списка имён пользователей в окне **«Редактирование пользователей»**, преподаватель выбирает пользователя, например, «Иванов Иван Иванович».

Затем, нажав на клавишу «Применить», преподаватель записывает параметры сенсорной клавиатуры, которые закреплены за выбранным пользователем, непосредственно в сенсорную клавиатуру «КЛАВИНТА».

После этих действий, сенсорная клавиатура «КЛАВИНТА», приобретает настройки, которые соответствуют пользователю «Иванову Ивану Ивановичу».



СЕНСОРНАЯ КЛАВИАТУРА  
**КЛАВИНТА**  
Программа «Педагог»

*Руководство пользователя*



ООО «Глобус А»  
127490, г. Москва, ул. Мусоргского д.3 офис 216  
тел./факс: 8 (499) 203-66-27  
e-mail: monolog@list.ru

